

その場で脈動をスピードチェック あなたの勇気を後押しします

パルスチェッカー PLS-1100は、傷病者の脈を検知することで救助者による AEDの使用および胸骨圧迫の実施の判断をサポートする装置です。

- ●傷病者の額に脈波センサを貼り、電源を入れるだけで自動的に脈動を判定。
- ●カラー液晶画面で、次にとるべき行動のガイダンスを表示。
- ■太陽光下の屋外でも見やすい画面。
- ■コンパクトで、専用のキャリングケースで携帯可能。







あなたに勇気を届けたい

~ 救命率向上のために、私たちは努力を続けています~





パルスチェッカー PLS-1100の使用方法

※本装置の使用者は、事前に使用方法の講習を受講してください。



本 体



パルスチェッカー PLS-1100

付属品



キャリングケース YC-110V

●操作ガイド

オプション



●パルスチェッカー用装着テープ YZ-062H4

規格

ディスプレイ	1.28型 反射型LCD (照度10万ルクス環境下で視認可能)
使用環境 (動作および待機)	周囲温度:-10℃〜50℃ 相対湿度:5〜95%(結露なきこと) 気 圧:540〜1060hPa
外装保護	IP44 ・直径1.0mm以上の大きさの外来固形物に対して保護している。 ・水の飛まつ(spraying water)に対して保護する。
耐用期間	8年間 (当社データの自己認証による。指定の保守点検を実施した場合に限る。 装着テープは単回使用。)
電源	単4アルカリ乾電池 1本 ※当社指定品
寸法·質量	本体 約幅63×高さ82×奥行18mm (最厚部20mm、突起部を除く) キャリングケース 約幅77×高さ104×奥行35mm (突起部を除く) 約69g (パルスチェッカー用装着テープ、キャリングケース、電池を含まず) 約145g (パルスチェッカー用装着テープ、キャリングケース、電池を含む)

関連製品

装着テープ

YZ-062H4

パルスチェッカー用



AED専用ホームページ AEDライン https://www.aed-life.com/



*PLS-1100のトレー

自動体外式除細動器 AED-3100 シリーズ カルジオライフ AED-3150/AED-3100

救助に使用した後に 電源をオフにすると 表示されます。







このカタログは、「UVエコインキ」「水なし印刷」で印刷しています。 顔写真は本人の同意を得て使用しています。 都合により外観・仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

型浩販売



付属品名:パルスチェッカー PLS-1100

販売名:自動体外式除細動器 AED-3100シリーズ カルジオライフ

医療機器承認番号 22700BZX00187000

クラス分類: 高度管理医療機器、 特定保守管理医療機器

日本光電工業株式会社 東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560 **└**03-5996-8000(代表) Fax 03-5996-8091

